

ACTYRIL DDS HOSPITAL

Détergent Désinfectant toutes surfaces hautement concentré, spécialement formulé pour nettoyer en profondeur tout surface en général.

Description

- > ACTYRIL DDS HOSPITAL est un nettoyant désinfectant puissant très concentré utilisable à faible concentration.
- > ACTYRIL DDS HOSPITAL est un détergent désinfectant pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces résistants à l'eau : murs, sols, sanitaires, tables, portes, véhicules de transport, matériel médical, etc.

Caractéristiques

- > Solution limpide de couleur bleu-verte agréablement parfumée.
- > Utilisable en eau froide ou chaude (jusque +60°C).
- > Large compatibilité avec les matériaux et revêtements de surfaces : pH proche de la neutralité à la dilution d'emploi.
- > pH du produit pur : environ 12.
- > pH du produit dilué : environ 8,5.
- > Non corrosif (absence d'oxydant).



Secteurs d'utilisations

- > Etablissements des santé.
- > Industries.
- > Hôtels.
- > Ecoles.
- > Toutes collectivité.

Propriété physico-chimique	Composition
<ul style="list-style-type: none"> > Liquide limpide bleu-vert > Parfum Bergamote > pH pure = 12 +/- 0.5 > pH en dilution à 1% = 8,5 +/- 0.5 	N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODÉCYLPROPANE-1,3-DIAMINE 50mg/g, CHLORURE DE DIDECYLDI-METHYLAMMONIUM 30mg/g, Tensioactif non ionique, Séquestrant, Excipients.

Propriétés microbiologiques

Efficacité	Concentration	Temps contact
NF EN 1276 Bactéricide (En conditions de saleté) <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - <i>Escherichia Coli</i> <i>Staphylococcus Aureus</i> - <i>Enterococcus Hirae</i>	1%	5 min.
NF EN 13697 Bactéricide (En conditions de saleté) <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - <i>Escherichia Coli</i> <i>Staphylococcus Aureus</i> - <i>Enterococcus Hirae</i>	5%	15 min
NF EN 13727 Bactéricide (En conditions de saleté) <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - <i>Escherichia Coli</i> <i>Staphylococcus Aureus</i> - <i>Enterococcus Hirae</i>	3%	15 min
NF EN 17387 Bactéricide (En conditions de saleté) <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - <i>Escherichia Coli</i> <i>Staphylococcus Aureus</i> - <i>Enterococcus Hirae</i>	5%	15 min.
NF EN 1650 Levuricide / Fongicide (En conditions de saleté) <i>Candida albicans</i> - <i>Aspergillus niger</i>	1%	5 min
NF EN 13697 Levuricide / Fongicide (En conditions de saleté) <i>Candida albicans</i> - <i>Aspergillus niger</i>	5%	15 min
NF EN 17387 Levuricide / Fongicide (En conditions de saleté) <i>Candida albicans</i> - <i>Aspergillus niger</i>	3%	15 min
NF EN 14348 Mycobactéricide (En conditions de saleté) <i>Mycobacterium terrae</i> - <i>Mycobacterium avium</i>	5%	15 min

Mode d'emploi

- > Lire attentivement les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité avant manipulation.
- > Pendant la manipulation du produit concentré, porter les équipements de protection.
- > Doser le produit à la concentration correspondant au degré de désinfection souhaité.

Surfaces

- > Pour le nettoyage des surfaces, doser le produit dans des flacons munis d'un vaporisateur.
- > Vaporisez le produit sur la surface.
- > Frottez et laissez agir 5 à 15 minutes.

Sols

- > Pour nettoyer les sols, versez le produit dans un seau.
- > Appliquez la solution obtenue avec un frange ou un serpillier propre.
- > Frottez et laissez agir 5 à 15 minutes.

Conseils d'utilisation

- > Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux dans une petite zone peu visible. Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles à l'eau.
- > Usage strictement réservé aux professionnels.
- > Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande.
- > Utilisez les biocides avec précaution.
- > Ne pas mélanger avec aucun autre produit.

Conditionnements

- > Confection de 02 poches de 1,5 Litre
- > Confection de 04 bidons de 5 Litre



Welkem by PULIRE professional
Z.I. Le Kram, Rue des Usines n°5, Tunis
Tel. +216-71973551 Fax +216-71973550
Web: www.welkem.net